



YOUR DISPOSABLE EXCELLENCE



DISPOGEL (17cm x 26cm)

FR: POCHE CHAUD/FROID

INDICATIONS FROID :

Hématomes, entorses, traumatismes, hyperthermie et en tous les cas où la cryothérapie est nécessaire.

INDICATIONS CHAUD :

Lumbago, torticolis, rhumatismes, hypothermie et en tous les cas où l'application du chaud est nécessaire

MODE D'EMPLOI – CONGELATEUR

Placer le sachet pour au moins 1h30/2h00 au congélateur. Au moment de l'utilisation introduire le sachet dans sa pochette ou dans un tissu avant de l'appliquer sur la zone douloureuse.

MODE D'EMPLOI – EAU

Plonger le sachet dans l'eau bouillante pour max 5 minutes. Retirer le sachet de l'eau, le sécher et le mettre dans sa pochette ou dans un tissu avant de l'appliquer sur la zone douloureuse.

MODE D'EMPLOI – POUR À MICRO-ONDES

Mettre la poche dans le four à micro-ondes pendant 1,5 minutes max en le réglant à 650 watts. Extraire le sachet, le malaxer afin de répartir uniformément la chaleur, l'introduire dans la poche-conteneur ou tissu prévus à cet effet et appliquer sur la partie concernée.

ATTENTION

Ne pas ingérer le contenu, ne pas casser le sachet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Envelopper toujours le sachet dans sa pochette ou dans un tissu pour éviter les risques de brûlures. Avant d'utiliser le sachet sur les bébés, les enfants ou les personnes âgées ou en cas de diabète ou maladie cardiovasculaire et/ou insensibilité de la peau (syndrome de Raynaud) il est impératif de consulter le médecin. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. En cas de doute sur le traitement à utiliser, consulter votre médecin. Ne pas appliquer sur la peau endommagée. Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser à nouveau si le sac est endommagé (i.e. trous, déchirures).

En cas d'accident grave résultant de l'utilisation du dispositif médical, signalez-le au fabricant et à l'autorité compétente de votre Pays de résidence.

MD

: IT: Dispositivo Medico, EN: Medical Device, FR: Dispositif Médical, ES: Dispositivo médico, PT: Dispositivo Médico, DE: Medizinprodukte, BG: Медицинско изделие, CS: Zdravotní zařízení, DA: Medicinsk enhed, EL: Ιατρική συσκευή, ET: Meditsiiniseade, FI: Lääkintälaite, HR: Medicinski uređaj, HU: Orvosi eszköz, LT: Medicinos prietaisas, LV: Medicīniska Ierīce, NL: Medisch apparaat, PL: Wyrób Medyczny, RO: Dispozitiv medical, SK: Zdravotnícka pomôcka, SL: Medicinski pripomoček, SV: Medicinskt hjälpmedel



Dispotech Srl

Via al Piano 29, 23020 Gordona (SO), Italy



Rev. 01 – 02/2020