


Rehotec®

GAMME DE SURÉLÉVATEURS DE TOILETTES ERGONOMIQUE

Références	Désignation
9/7207	Rehausse WC Rehotec 7cm
9/7207C	Rehausse WC Rehotec 7cm avec couvercle
9/7210	Rehausse WC Rehotec 10cm
9/7210C	Rehausse WC Rehotec 10cm avec couvercle
9/7213	Rehausse WC Rehotec 13cm
9/7213C	Rehausse WC Rehotec 13cm avec couvercle
9/7215	Rehausse WC Rehotec 15cm
9/7215C	Rehausse WC Rehotec 15cm avec couvercle

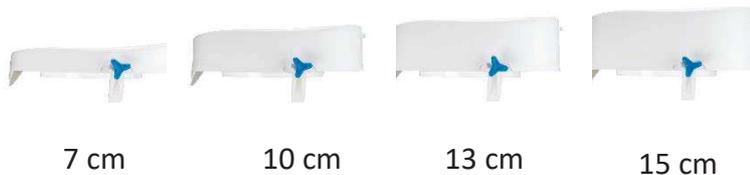

Atouts :

- Confortable et ergonomique :
 - une pente générale de 3° de l'assise respecte l'angulation naturelle du bassin.
 - un profil supérieur incurvé épouse la forme du corps.
 - de larges surfaces d'appui à l'avant et à l'arrière grâce au profil particulier.
 - molette à préhension facile et ergonomique.
- Pratique au quotidien :
 - Dégagements importants à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'hygiène intime.
 - ouverture du couvercle sans toucher l'assise.
 - possibilité de s'asseoir couvercle rabattu.
- Conception hygiénique du produit:
 - aucune aspérité extérieure.
 - facile à nettoyer.
 - les liquides ne pénètrent pas à l'intérieur.




Installation :

- La lunette des toilettes doit être retirée avant de fixer le produit. Le montage s'effectue en calant la forme avant du surélévateur contre l'avant du WC puis en serrant les 2 pattes de fixation grâce aux vis latérales. La conception ergonomique et robuste des vis permet de réaliser un serrage puissant. Le traitement antiglisse des pattes évite le risque de glissement.

Mise en place du couvercle :

- Le couvercle se monte et se retire par un simple encliquetage en position retournée.
- En position rabattue ou à la verticale, une sécurité empêche le dé-encliquetage du couvercle.

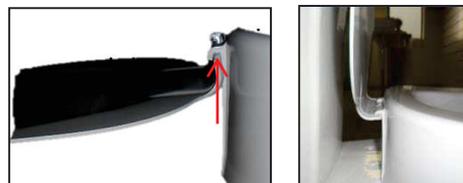

Description :

- Dimensions : 43 x 44,5 cm
- Poids maximum utilisateur : 180 kg

Composition :

- Polypropylène

Entretien :

- Nettoyage eau, savon et détergents ménagers non abrasifs.
- Supporte le lavage en machine et l'autoclave 120°C pendant 30 minutes.
- Ne pas immerger, ne pas retourner le produit lors du lavage.

Précautions d'emploi :

- Ne pas monter sur le produit.
- Vérifier le serrage des pattes avant chaque utilisation.
- Le rehotec doit être posé sur une surface plane, ne pas laisser, par exemple les désodorisants sur la cuvette des toilettes.
- Ne pas utiliser ce produit s'il présente des défauts ou si il est cassé.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :


- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 43 x 44,5 x 19,5 cm.

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45



DIMENSIONS EN CM

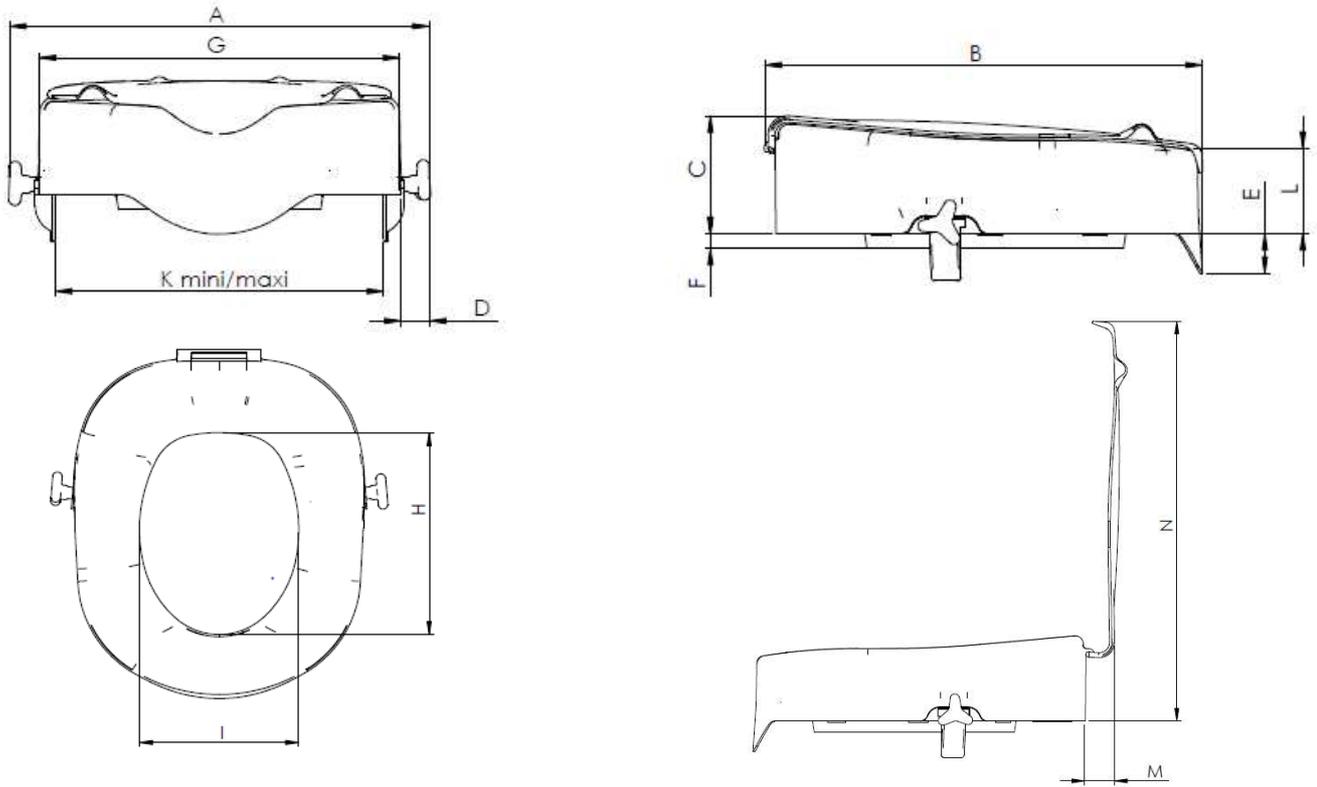

	9.7207	9.7207C	9.7210	9.7210C	9.7213	9.7213C	9.7215	9.7215C
A	43	43	43	43	43	43	43	43
B	44	44	44	44	44	44	44	44
C	7	7,5	10	10,5	13	13,5	15	15,5
D	3	3	3	3	3	3	3	3
E	4	4	4	4	4	4	4	4
F	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
G	35	35	35	35	35	35	35	35
H	26	26	26	26	26	26	26	26
I	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
K mini/maxi	32/42	32/42	32/42	32/42	32/42	32/42	32/42	32/42
L	6	6,5	9	9,5	11	11,5	13	13,5
M	-	4	-	4	-	4	-	4
N	-	48	-	52	-	54	-	56