

MASQUE À USAGE NON SANITAIRE-GRAND PUBLIC

UNSI (TESTÉ DGA)

CONFORTABLE

EFFICACITÉ DE FILTRATION
(particules de $3\mu\text{m}$ >90%)

RESPIRANT



testé 10 lavages

SPÉCIFICITÉS

Modèle : TN1

Dimensions : 20cm x 10cm

Composition : 100 % Polyester

Tissu fabrication Française

INSTRUCTION D'UTILISATION

- Lavage en machine à laver avec une lessive classique / lavage à 60°C.
- Séchage en tambour
- Repassage à température adéquate selon les logos ci-dessous.



Type de produit : « Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d'information du 29 mars 2020 »

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA

Matériau NRBC, 5 rue Lovelock, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-3698/DGA MNRBC/2000305/NP et qui supporte 10 lavages (rapport RP/20-3995/DGA MNRBC/2000305/NP))

= efficacité de filtration des particules de $3\mu\text{m}$ > 90 %
- perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m⁻².s⁻¹

Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins



LV.DISTRIBUTION SAS



NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
02. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
03. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
04. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.
05. Pour le mettre :
01. Tenez le masque par les lanières élastiques.
02. Placez-le au niveau de votre bouche.
03. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
04. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer la barrette nasale pour vous aider.
05. Évitez de le toucher et de le déplacer.
06. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

01. Quand vous avez porté le masque 4h.
02. Quand vous souhaitez boire ou manger.
03. Quand il devient difficile de respirer.
04. Si le masque s'humidifie.
05. Si le masque est endommagé.
06. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

01. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
02. Débranchez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
03. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
04. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
05. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ?

Avant ouverture :

01. Stockez le masque dans son emballage d'origine (protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil). Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.
02. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
03. Ce masque a été testé pour 10 lavages. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
04. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
05. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
06. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatisant la barrette nasale et en reformant les plis sans forcer.

Après le lavage :

01. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches)
 02. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
 03. Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée par le fabricant.
 04. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).
- SECURITE
01. Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.
 02. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m⁻².s⁻¹ et doit permettre son port pour une durée de 4h.

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

DÉCOMpte D'UTILISATION DES MASQUES

Les masques pouvant être lavés 10 fois, chaque masque est donc utilisable 11 fois. Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :

Utilisation 1	Utilisation 2	Utilisation 3	Utilisation 4	Utilisation 5	Utilisation 6
Utilisation 7	Utilisation 8	Utilisation 9	Utilisation 10	Utilisation 11	

